

# Test Bio Schirmer

## Sterylny pasek okulistyczny do badania zespołu suchego oka – 100 sztuk/opakowanie

### Skład:

Paski Bio Schirmer wykonane są z bibuły filtracyjnej Whatmann nr 41, która mierzy ilość produkowanych łez.

### Wskazania:

Test służy do pomiaru produkcji łez i ich objętości dla oceny zespołu suchego oka

### Sposób użycia:

Zegnij górną część paska do pozycji zerowej i włóż pasek do sklepienia spojówki jedną trzecią drogi od bocznego kąta oka. Zamknij oko na 5 minut w celu pomiaru produkcji łez. W tym samym czasie testuje się oboje oczu. Po tym czasie usuwamy bibułę i wykonujemy pomiar ilości płynu.

### Sposób odczytu wyników:

- Zwilżenie  $\geq 15$  mm paska w czasie 5 minut interpretuje się jako wynik prawidłowy.
- Zwilżenie 14–5 mm paska w czasie 5 minut oznacza lekki deficyt wodnej składowej łez.
- Zwilżenie 8–4 mm paska w czasie 5 minut oznacza umiarkowany deficyt wodnej składowej łez.
- Wartość  $< 4$  mm oznacza ciężki zespół suchego oka z niedoborem filmu łzowego.

### Ostrzeżenia i zalecenia:

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- W przypadku uszkodzenia lub wcześniejszego otwarcia opakowania paska zawartość może nie być sterylna.
- Przytrzymaj końcówkę opakowania w jego połowie i rozerwij je bez dotykania sterylnego paska.
- Nie należy stosować w przypadku soczewek kontaktowych miękkich.
- Nie należy przechowywać w miejscu o bezpośrednim nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze.
- Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie nadaje się do ponownego użycia. Zużyty pasek należy do odpadów biologicznych. Ponowne jego użycie może prowadzić do różnych reakcji biologicznych włącznie, lecz nie jedynie, z zapaleniem, infekcją, zranieniem lub innymi nieznanymi stanami klinicznymi.
- Nie wolno używać produktu po upływie terminu ważności.

**Zawartość:** 100 sterylnych, indywidualnie opakowanych pasków w jednorazowym pudełku.

**Przechowywanie:** Przechowuj w temperaturze pokojowej.

biotech



**Bio-Tech Vision Care Pvt. Ltd.**  
Plot. No. 555-556-557, Nr. Subham  
Tex-O-Pack, Khatraj, Ta. Kalol,  
Dist. Gandhinagar, Gujarat, India.  
[www.biotechvisioncare.com](http://www.biotechvisioncare.com)  
[intbusiness@biotechvisioncare.com](mailto:intbusiness@biotechvisioncare.com)  
[sales@biotechvisioncare.com](mailto:sales@biotechvisioncare.com)



**Neuvida Medical Device Inc Limited**  
136-137 Churchill House, Stirling Way  
Borehamwood, WD6 2HP, England.